

# PRESSCARE G300M

## PRESSOTHÉRAPIE | 2 SORTIES - 3 PROGRAMMES D'INFLATION

DISPOSITIF MÉDICAL CONVENANT AUX BESOINS DE SANTÉ, DE BIEN-ÊTRE, DE BEAUTÉ ET DE DÉTENTE. IDÉAL POUR DRAINAGE LYMPHATIQUE, LYMPHOEDÈMES, PROBLÈMES DE CIRCULATION VEINEUSE, JAMBES LOURDES, ŒDÈMES, MEMBRES ENFLÉS, RÉTENTION D'EAU, CELLULITE, MASSAGE (POUR) HÉMATOME, STASIS VEINEUX. IL PEUT AUSSI ÊTRE UTILISÉ SIMULTANÉMENT AVEC TROIS ACCESSOIRES DIFFÉRENTS. IL EST RECOMMANDÉ DE CONSULTER LE MÉDECIN AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Sortie</b>	2
<b>Programmes</b>	3
<b>Pression</b>	0-180 mmHg $\pm$ 10%
<b>Minuterie</b>	jusqu'à 99 minutes
<b>Alimentation a secteur</b>	240 V AC, 50 Hz
<b>Taille</b>	185x180x230 mm
<b>Poids</b>	3 Kg

### EQUIPEMENT


- Selon la configuration
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation

### CONFIGURATIONS DISPONIBLES


	BOTTE	MANCHON	BANDE ABDOMINALE	CÂBLE DOBLEUR
· PRESSCARE G300M-1	1	/	/	/
· PRESSCARE G300M-2	2	/	/	/
· PRESSCARE G300M-3	2	/	1	1
· PRESSCARE G300M-1B	/	1	/	/




CE  
0598

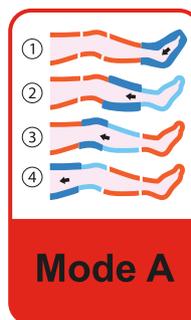

Mode A

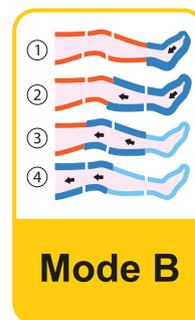

Mode B

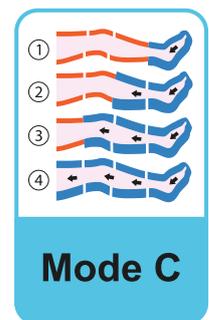

Mode C

**MODE A:** la séquence du programme prévoit le gonflement et le dégonflement de la botte un secteur à la fois, à partir de la partie la plus distale (pied ou main) jusqu'à la partie la plus proximale.

**MODE B:** la séquence du programme prévoit le gonflement de deux chambres à la fois, en simulant la fonction des bottes à chambres superposées.



**MODE C:** la séquence du programme effectue la pression à partir du pied et en gardant les chambres précédentes gonflées jusqu'au moment où la jambe entière (ou bras ou abdomen) est gonflée au niveau de l'aîne.

# PRESSCARE G300M

## PRESSOTHÉRAPIE | 2 SORTIES - 3 PROGRAMMES D'INFLATION

### TAILLE ACCESSOIRES (4 SECTIONS)

BOTTES TAILLE "S"	(A) LONGUEUR AINE - TALON 72 cm (B) TOUR DE CUISSE 60 cm avec EXTENSION 70 cm (C) CIRCONFÉRENCE CHEVILLE 37 cm avec EXTENSION 42 cm
BOTTES TAILLE "M"	(A) LONGUEUR AINE - TALON 82 cm (B) TOUR DE CUISSE 67 cm avec EXTENSION 77 cm (C) CIRCONFÉRENCE CHEVILLE 37 cm avec EXTENSION 42 cm
BOTTES TAILLE "L"	(A) LONGUEUR AINE - TALON 92 cm (B) TOUR DE CUISSE 74 cm avec EXTENSION 84 cm (C) CIRCONFÉRENCE CHEVILLE 40 cm avec EXTENSION 45 cm
MANCHON	(A) 84 cm - (B) 63 cm (C) CIRCONFÉRENCE ÉPAULE 43 cm avec EXTENSION 53 cm (D) CIRCONFÉRENCE POIGNET 31 cm avec EXTENSION 36 cm

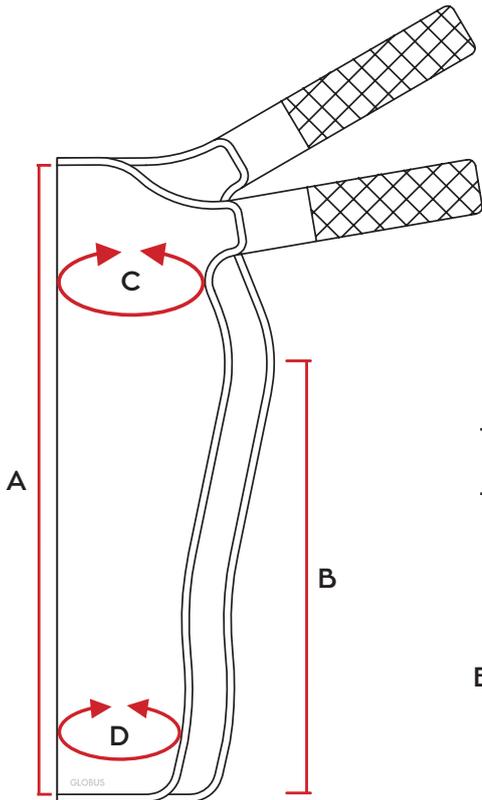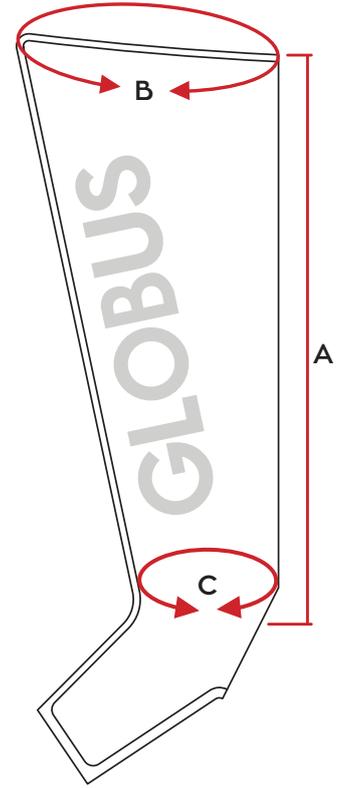

BANDE ABDOMINALE	(A) 133 cm - (B) 38 cm CIRCONFÉRENCE ABDOMINALE de 82 cm à 114 cm
------------------	--



CÂBLE DOUBLEUR pour utiliser trois accessoires en même temps	CÂBLE UNIQUE
--	--------------

N.B. Toutes les **EXTENSIONS** doivent être considérées comme un accessoire optionnel disponible sur demande.

Les **ACCESSOIRES**, selon le type de configuration, peuvent être en option ou fournis.