

# TECAR **DERMATO-FUNCIONAL**

Una sola tecnología, **infinitas posibilidades de aplicación**



**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE



## QUIÉNES SOMOS

**GLOBUS** ha sido una empresa de éxito mundial que produce equipos electromédicos portátiles durante más de 30 años.

Nuestra amplia gama incluye líneas completas de productos para **FISIOTERAPIA, DEPORTE, VETERINARIA** y **ESTÉTICA**.

## NUESTRA MISIÓN

La misión de **GLOBUS** es contribuir a promover la salud y el bienestar en el mundo proporcionando productos de alta calidad para profesionales de rehabilitación y fisioterapia, así como para usuarios particulares que deseen mejorar su calidad de vida con total seguridad y beneficiarse de las tecnologías más modernas disponibles en el mercado.

## NUESTRA HISTORIA

**GLOBUS** fue fundada en 1984 en Codognè, en la provincia de Treviso (Italia), por su actual Presidente y CEO, Pierpaolo Lucchetta, bronce en voleibol en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y profesional galardonado hasta 1994.

La experiencia como deportista de alto nivel de su Presidente ha sido fundamental para que **GLOBUS** diseñe y desarrolle diferentes líneas de productos para la recuperación post-lesión, el fortalecimiento muscular y la mejora general del rendimiento deportivo. Para desarrollar productos seguros, eficaces y tecnológicos, **GLOBUS** colabora con varias universidades e institutos de investigación de todo el mundo y se adhiere a las directrices científicas más rigurosas.

Hoy, **GLOBUS** es una empresa de renombre en el sector de la rehabilitación y fisioterapia y exporta a más de 50 países de todo el mundo. Los productos **GLOBUS** están certificados UNI CEI EN ISO 13485:2016 y Quality Assurance System CE en Europa, FDA en Estados Unidos e IEx en Brasil.

## Línea **GLOBUS TECAR**

Con los aparatos de la línea **TECAR GLOBUS** podrás realizar cualquier tipo de tratamiento **dermatofuncional** y trabajar múltiples zonas a todos los niveles de forma **eficaz, segura y rápida.**

La **guía de tratamiento** el **atlas**, los **protocolos preestablecidos**, las **funciones especiales** y la amplia gama de **accessorios** desarrollados específicamente para diferentes áreas de aplicación garantizan nuevas posibilidades y **resultados siempre satisfactorios.**

# REACTIVA

## EL METABOLISMO CELULAR

**TECAR TERAPIA** actúa con extraordinaria eficacia en profundidad sobre el metabolismo celular y permite obtener resultados increíbles en diferentes patologías, incluidas las crónicas, como ninguna otra tecnología es capaz de conseguir.

Gracias a la versatilidad de nuestros dispositivos, será posible intervenir, por ejemplo, en la reactivación de tejidos, celulitis esclerótica o edemas y hematomas profundos con excelentes resultados desde el primer tratamiento.

- **DISFUNCIONES DE LA CIRCULACIÓN VENOSA Y LINFÁTICA**
- **CELULITIS EDEMATOSA, FIBROSA Y ESCLERÓTICA**
- **LAXITUD E HIPOTONÍA DE LOS TEJIDOS**
- **ADIPOSIDAD LOCALIZADA**
- **REABSORCIÓN DE EDEMAS Y HEMATOMAS**



# DISFUNCIONES DE LA CIRCULACIÓN VENOSA Y LINFÁTICA



Con **TECAR TERAPIA** se consigue **abrir las estaciones linfáticas** y **drenar la acumulación de fluidos intersticiales**, facilitando la **reabsorción de hinchazones** en las extremidades y el reequilibrio del sistema venoso y linfático.

# CELLULITE EDEMATOSA, FIBROSA Y ESCLERÓTICA

Tratamiento en modalidad Resistiva con las **piezas de mano especiales (FASCIA TOOLS KIT)** para la **resolución de nódulos fibrosos** y **remodelación del tejido conjuntivo**.



# ESTIMOLA

## LA SALUD DE LA PIEL

Con los dispositivos **TECAR GLOBUS** también puede estimular la producción de colágeno y elastina en la piel de una manera excepcionalmente precisa y controlada, estimulando el proceso natural de regeneración de tejidos y disminuyendo exponencialmente el tiempo de recuperación y curación, entre otros, de cicatrices y queloides tras una cirugía.

- **TRATAMIENTOS DERMATOFUNCIONALES FRENTE AL ANTIENVEJECIMIENTO**
- **ESTIMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COLÁGENO Y ELASTINA**
- **PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA**
- **EDEMA Y DOLOR POST CIRUGÍA ESTÉTICA Y REPARADORA**
- **QUELOIDES Y CICATRICES HIPERTRÓFICAS**
- **ÚLCERAS Y QUEMADURAS**







# ESTIMULACIÓN DEL COLÁGENO Y PRODUCCIÓN DE ELASTINA



PIEL ENVEJECIDA

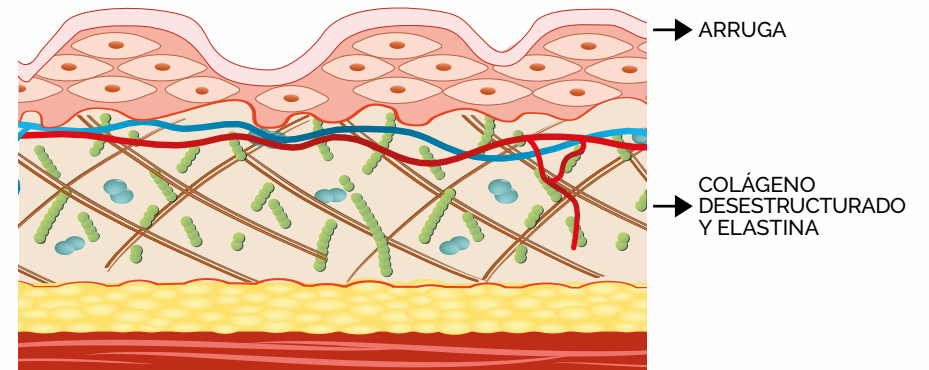

PIEL REGENERADA CON TECAR GLOBUS

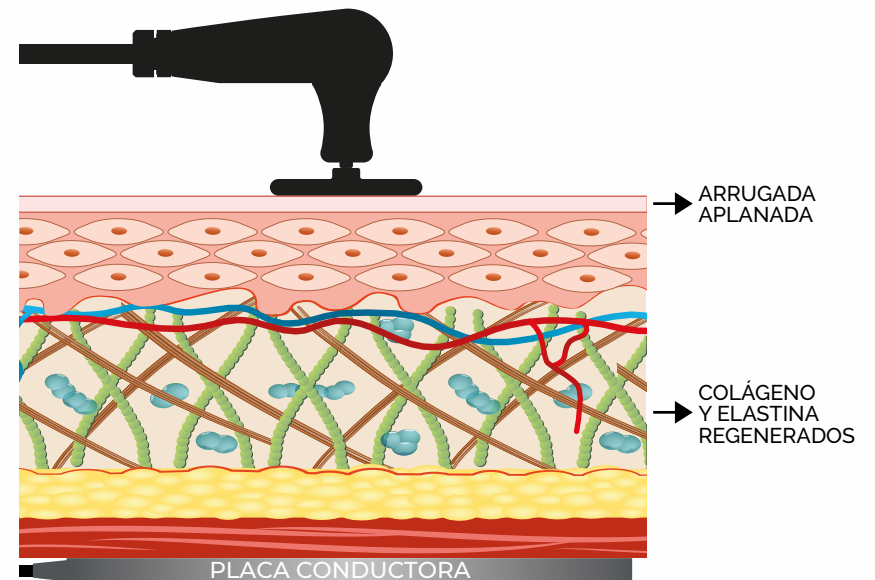

# QUELOIDES Y CICATRICES HIPERTRÓFICAS



Los queloides son lesiones fibróticas de la piel que resultan de una alteración en el proceso normal de cicatrización de una herida en la piel.

El tratamiento combinado con **TECAR TERAPIA** y **FASCIA TOOLS** permite tanto prevenir su formación, como actuar de forma eficaz sobre el tejido fibrótico, con resultados estéticos y funcionales.

# RESTAURA

## TU COMODIDAD ÍNTIMA

La precisión de nuestros dispositivos **TECAR** permite actuar de manera efectiva y con total seguridad y comodidad, también para resolver problemas directamente relacionados con la zona genital.

Se han diseñado accesorios específicos para tratamientos tanto internos como externos, que mejoran la salud del suelo pélvico, en hombres y en mujeres, restauran el tono y la elasticidad vaginal y garantizan excelentes resultados en caso de cicatrices por parto.

- MEJORA DEL TONO DEL SUELO PÉLVICO
- CICATRICES POR PARTO
- DIÁSTASIS ABDOMINAL
- SÍNDROMES MIOFASCIALES ENDOPÉLVICOS
- REHABILITACIÓN PERINEAL PARA HOMBRES Y MUJERES
- LAXITUD VAGINAL

# MEJORA DEL TONO DEL SUELO PÉLVICO

El **INTIMA KIT** está diseñado para realizar tratamientos endopélvicos con total seguridad. El modo capacitivo permite una regeneración profunda de las mucosas con el máximo confort.

En combinación con las piezas de mano tradicionales y los kits **MANOS LIBRES**, proporciona un sistema completo para la mejora del tono y para todas las disfunciones del suelo pélvico.



# CICATRICES POR PARTO



El embarazo deja una completa transformación física y emocional en el cuerpo de la madre y, en ocasiones, signos, como cicatrices externas o internas, que pueden inducir dolor y graves disfunciones funcionales, incluso después de algún tiempo. **GLOBUS TECAR TERAPIA** incluye funciones y electrodos especiales para la rehabilitación de todas estas disfunciones.

# DIÁSTASIS ABDOMINAL



Aplicación del método «**HANDS-FREE**» para el tratamiento de la diástasis abdominal.

Los electrodos adhesivos permiten una transferencia de energía profunda que estimula la activación y síntesis de neo colágeno en el área de la diástasis, al mismo tiempo que el terapeuta puede trabajar en la reeducación muscular respiratoria o abdominal.

# LÍNEA PROFESIONAL DIACARE

## DIACARE 7000

- Protocolos Médicos
- Potencia Nominal (NP): 350W  $\pm$  10%
- Pantalla: Pantalla táctil a color de 7"
- Frecuencias de emisión: 300kHz - 400kHz - 448kHz - 470kHz  
700kHz - 1000kHz - 1200kHz,  $\pm$  10%
- Fuente de alimentación de red: - 230V AC, 50-60Hz, 3,7A  
- 115V AC, 50-60Hz, 7,4A



## DIACARE 5000

- Protocolos Médicos
- Potencia Nominal (NP): 180W  $\pm$  10%
- Pantalla: Pantalla táctil a color de 4,3"
- Frecuencias de emisión: 300kHz - 400kHz - 448kHz  
470kHz - 700kHz - 1000kHz,  $\pm$  10%
- Fuente de alimentación de red: 100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A





# LÍNEA PROFESIONAL TECAR BEAUTY MED

## TECAR BEAUTY 7000 MED

- Protocolos Estéticos y Médicos
- Potencia Nominal (NP): 350W  $\pm$  10%
- Pantalla: Pantalla táctil a color de 7"
- Frecuencias de emisión: 300kHz - 400kHz - 448kHz - 470kHz  
700kHz - 1000kHz - 1200kHz,  $\pm$  10%
- Fuente de alimentación de red: - 230V AC, 50-60Hz, 3,7A  
- 115V AC, 50-60Hz, 7,4A



## TECAR BEAUTY 6000 MED

- Protocolos Estéticos y Médicos
- Potencia Nominal (NP): 180W  $\pm$  10%
- Pantalla: Pantalla táctil a color de 4,3"
- Frecuencias de emisión: 300kHz - 400kHz - 448kHz  
470kHz - 700kHz - 1000kHz,  $\pm$  10%
- Fuente de alimentación de red: 100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A



KIT DE ELECTRODOS CAPACITIVOS  
Y RESISTIVOS CONVEXOS



KIT DE ELECTRODOS CAPACITIVOS CÓNCAVOS



## MANÍPULOS NEUTRO ACTIVO Y BIPOLAR



## COBERTORES PARA ELECTRODOS RESISTIVOS



DYNAMIC HANDLE



ÍNTIMA KIT



## KIT MANOS LIBRES PLUS

PARA DIACARE 7000 Y TECAR BEAUTY 7000 MED



PARA DIACARE 5000 Y TECAR BEAUTY 6000 MED



PLACAS NEUTRAS - FASCIA TOOLS KIT - PIEZAS DE MANO Y ELECTRODOS



## CARROS PARA DISPOSITIVOS





Para conocer las características técnicas de nuestros dispositivos en detalle

visite la página web  
**globuscorporation.com**

o escanee el código



**DOMINO SRL**  
Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALIA



(+39) 0438 7933

Material informativo para los operadores del sector.

Las imágenes y las características técnicas de este folleto no son vinculantes y pueden ser modificadas por el fabricante en cualquier momento sin previo aviso.  
Para obtener más información sobre nuestros productos y tratamientos, para ver los vídeos sobre los productos y para encontrar nuestros distribuidores, visite nuestro sitio web.